

Maxi-Wipes

trockene Vliestücher zur Tränkung
mit Desinfektionsmittel



Anwendungsleitfaden

Präparatetyp:

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit flüssigen Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen- u. Medizinprodukten. Sie können in Kombination mit gebrauchsfertiger UNIGLOVES Sprühdeseinfektion eingesetzt werden.

UNIGLOVES Maxi-Wipes sollten aus dem für diese spezielle Hygieneanforderung konzipierten wiederver-schließbaren Spendereimer (3 ltr. bzw. 5 ltr.) entnommen werden.

Anwendungsbereiche:

UNIGLOVES Maxi-Wipes können zur Desinfektion von Flächen- u. Medizinprodukten in Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeheimen, Laboren und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

Anwendung:

Tränken Sie die trockenen Wischtücher im Spendereimer mit 1,5 ltr. (70er Rolle) bzw. 2 ltr. (90er Rolle) gebrauchsfertiger Desinfektionslösung.

Nach ca. 30 Minuten ist die Rolle gleichmäßig durchtränkt und einsatzbereit. Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen.

Bitte unbedingt die Einwirkzeit des benutzten Desinfektionsmittel beachten. Tragen Sie bitte auf dem beigefügtem Etikett Produktname, Lot-Nummer, Anwendungskonzentration, Einwirkzeit, Datum des Ansatzes und Haltbarkeit der Lösung ein. Die Standzeit beträgt bei ordnungsgemäß verschlossenem Behälter bis zu 28 Tagen.

Kleben Sie das ausgefüllte Etikett auf die Entnahmeöffnung des Spendereimers. Bei jedem Rollenwechsel muß ein neues Etikett ausgefüllt und aufgeklebt werden.

Der Spendereimer ist spülmaschinenfest bis 60°C!

Zusammensetzung:

1 Rolle besteht aus 70 bzw. 90 glatten, trockenen Wischtüchern, 50g/m², je 30 x 30 cm, fusselfreiem Spunlace-Vlies.

Lieferformen:

Packungsgröße	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
Rolle à 70 Blatt (für 3 Liter Eimer)	8 x 1 Rolle	9070
1,5 Liter Sprühdeseinfektion Duftneutral*	8 x 1 Beutel	90-N615
1,5 Liter Sprühdeseinfektion Lemon fresh*	8 x 1 Beutel	90-N015
Spendereimer 3 Liter	1 Eimer mit Deckel	9072
Rolle à 90 Blatt (für 5 Liter Eimer)	8 x 1 Rolle	9022
2,0 Liter Sprühdeseinfektion Duftneutral*	8 x 1 Beutel	90-N620
2,0 Liter Sprühdeseinfektion Lemon fresh*	8 x 1 Beutel	90-N020
Spendereimer 5 Liter	1 Eimer mit Deckel	9026

* DGHM/VAH gelistet